

Defibtech Lifeline AED software v2.003 upgrade procedure

Figuur 1



Druk de oranje batterij-uitwerpknop in om de batterij te verwijderen.

Figuur 2



Steek de DSU-100 software upgradekaart in de kaartsleuf zoals aangegeven.

Figuur 3



Druk de kaart in de sleuf totdat deze op zijn plaats klikt en niet uitsteekt.

1. Plaats de datakaart met upgrade software:

1. Druk de oranje batterij-uitwerpknop in om de batterij uit het apparaat te verwijderen zoals afgebeeld in **Figuur 1**.
2. Steek de DSU-100 Software Upgradekaart in de kaartsleuf boven het batterijcompartiment zoals aangegeven in **Figuur 2**.
3. Druk de datakaart zover op zijn plaats totdat de kaart op zijn plaats klikt zoals afgebeeld in **Figuur 3**. Let erop dat de kaart niet uitsteekt over de rand.
3. Steek de batterijunit terug in de AED, zodat deze weer stevig op zijn plaats klikt. Het is mogelijk dat de AED een korte batterijzelftest verricht en dan weer uitschakelt.

2. Voer de upgrade uit:

1. Zet het apparaat aan door de groene AAN/UIT-knop in te drukken en weer los te laten.
2. Nadat de AED begint te spreken, druk dan nogmaals blijvend op de groene AAN/UIT-knop en houdt deze ingedrukt totdat het apparaat automatisch herstart en overgaat in de upgrademodus. Op dat moment zult u de stemindicatie horen 'Uitvoering Apparaat Upgrade'. Laat de AAN/UIT-knop los en laat de AED de upgrade uitvoeren zonder de AED verder aan te raken totdat de upgrade is afgerond.
3. De AED zal gaan piepen en de indicatorlampjes op het apparaat zullen opeenvolgend branden, aangevende dat de upgrade wordt uitgevoerd. Wanneer de upgrade afgerond is spreekt de AED: 'Apparaat Upgrade Compleet, Versie 2,0,0,3. en dan 'Apparaat schakelt uit'.

Opmerking: Wanneer u hoort 'Upgrade fout', 'Datakaart fout', 'Datakaart vol', 'Datakaart ontbreekt' of 'Vervang datakaart' op ieder moment van dit proces, dan is de upgrade waarschijnlijk niet geslaagd. Neemt u contact op met uw dealer of de Medizon klantenservice (050-313 30 96).

3. Verwijder de upgradekaart:

Wacht totdat de AED zichzelf uitschakelt, verwijder dan de batterij door de oranje batterij-uitwerpknop in te drukken. Verwijder de upgradekaart door eerst de datakaart verder in de kaartsleuf te drukken en vervolgens weer los te laten zodat de kaart vrijkomt. Verwijder nu de kaart uit de AED.

4. Plaats de batterijunit terug:

Controleer of een goede 9-Volt batterij is geïnstalleerd in de batterijunit en plaats de batterijunit dan terug in de AED. De AED zal een korte batterijunit zelftest verrichten en schakelt zichzelf uit.

5. Verricht een AED zelftest:

Verricht een handmatig gestarte zelftest als volgt:

1. Met de AED uitgeschakeld, drukt u blijvend op de AAN/UIT-knop gedurende 5 seconden totdat de AED zegt: 'Uitvoering apparaat-zelftest'.
2. Laat de AAN/UIT-knop los en wacht totdat de zelftest is afgerond (ongeveer tien seconden). De indicatielampjes van de AED zullen aan en uit gaan en u zult een aantal interne clicks horen.
3. Tegen het eind van de test, zal de AED de testresultaten rapporteren en schakelt daarna automatisch uit. Controleer of de AED vermeldt 'Apparaat OK' voordat deze zichzelf uitschakelt.
4. Wanneer u een andere boodschap hoort bij het afsluiten van de zelftest, dan is de upgrade waarschijnlijk niet geslaagd. Kijkt u verder in de handleiding bij hoofdstuk 5 (Onderhoud en probleemanalyse met de Lifeline AED) of neem contact op met uw leverancier. De handleiding vindt u ook terug op internet (www.defibtech.nl).

6. Stuur de datakaart en het Registratie upgradeformulier terug naar Medizon

Noteer u alstublieft de serienummer(s) van uw geüpgrade AED('s) op het registratie-upgradeformulier, onderteken en dateer het formulier en stuur deze retour aan Medizon in de bijgeleverde postvrije enveloppe.

7. De AED is nu klaar voor gebruik:

De upgrade is nu compleet.

Opmerking: Nadat uw AED met succes is geüpgrade kunt u stoppen met de maandelijkse handmatige zelftest welke werd aanbevolen in onze software upgrade bekendmakingsbrief van 19 maart 2007.

Uw AED is met deze upgrade tevens voorzien van de nieuwe reanimatierichtlijnen 2005/2006. De aanvulling op de gebruikershandleiding kunt u terugvinden op www.defibtech.nl.

Als onderdeel van het normale routineonderhoud, aanbevolen in de Lifeline AED gebruikershandleiding, blijft u de status van de AED controleren door dagelijks de Actieve Status Indicator (ASI) aan de rechterbovenkant van de AED te checken:

Groen knipperend betekent dat de AED en de batterijunit operationeel zijn.

Rood knipperend of **niet-knipperend** betekent dat de AED service nodig heeft. Neem de AED uit gebruik en volg de probleemanalyse in de gebruikershandleiding (Hoofdstuk 5)