

Directe aanbevelingen voor de veldactie 2007

Deze aanbevelingen gelden voor alle Lifeline AED's van Defibtech die in de Benelux zijn uitgeleverd voor 9 maart 2007. Deze AED's zijn voorzien van een software versie 2.002 of eerdere versies.

Wij raden u aan om **de volgende procedure onmiddellijk uit te voeren en vervolgens eenmaal per maand** totdat de AED is voorzien van de nieuwe software:

- Verricht een handmatig opgestarte zelftest:
 - Hou gedurende 5 seconden de AAN/UIT-knop ingedrukt, totdat de AED zegt: 'Uitvoering apparaat zelftest'. Wanneer de AED begint te spreken, laat u de AAN/UIT-knop los.
 - De AED zal een zelftest verrichten gedurende ongeveer 10 seconden, vermeldt dan de status en schakelt daarna automatisch uit. De AED meldt:
 - 'Apparaat OK'- Het apparaat en de batterij zijn gebruiksklaar.
 - 'Vervang batterij-unit direct' of 'Batterij-unit bijna leeg'- de batterij-unit heeft een lage spanning en kan onvoldoende energie hebben om een redding uit te voeren. Vervang de batterij-unit direct.
 - 'Vervang 9 Volt batterij'- de 9 Volt batterij in de batterij-unit moet worden vervangen. Vervang de 9 Volt batterij met een lithium batterij zoals is beschreven in de handleiding en verricht nogmaals een manueel opgestarte zelftest zoals boven beschreven.
 - Indien een andere melding wordt gesproken, kijkt u dan in hoofdstuk 5 van de Gebruikershandleiding (Onderhoud en probleemanalyse van de Lifeline AED). De Gebruikershandleiding kunt u tevens downloaden via www.defibtech.nl. Wanneer u vragen of onduidelijkheden heeft, neem de AED dan uit gebruik en neem contact op met uw dealer of met Medizon.
- LET OP: De procedure zoals hierboven beschreven moet slechts eenmaal per maand worden verricht. Ieder handmatig verrichte zelftest consumeert namelijk batterij capaciteit.
- Nadat de bovenbeschreven test is verricht, blijft u dan dagelijks de status van de AED checken zoals aanbevolen in de Gebruikershandleiding (sectie 5.2 Routine onderhoud) door de actieve status indicator (LED-lampje rechts boven) te controleren:
 - Groen knipperend geeft de indicator aan dat de AED en batterij-unit gebruiksklaar zijn.
 - Rood knipperend of geheel niet knipperend geeft aan dat de AED onderhoud nodig heeft. Haal de AED uit gebruik en volg de probleem analyse in de Gebruikershandleiding of neem contact op met uw dealer of Medizon.

Indien u vragen heeft over deze aanbevelingen leest u dan ook het formulier op internet met veelgestelde vragen (FAQ) over deze veldactie of neem contact op met uw dealer of met de klantenservice van Medizon (050-313 30 96).